

Nebulizador compresor C101 Essential (NE-C101-E) X101 Easy (NE-C101-EO) Manual de instrucciones

IM-NE-C101-E-ES-03-11/2019
3A4311 rev.00
Fecha de publicación: 2019-11-15

Uso previsto

Finalidad médica: Este producto está destinado para su uso con medicamentos inhalados indicados en el tratamiento de trastornos respiratorios.

Usuario al que está destinado:

- Profesionales sanitarios legalmente titulados como médicos, enfermeros y terapeutas.
- Cuidadores o pacientes que sigan las instrucciones de médicos cualificados para prescribir el tratamiento en casa.
- El usuario también deberá tener conocimientos generales sobre el funcionamiento del C101 Essential / X101 Easy y sobre el contenido de este manual de instrucciones.

Pacientes a los que va destinado: Personas que padecen enfermedades respiratorias y precisan de medicación inhalada.

Entorno: Este producto está destinado para su uso en un entorno doméstico típico.


Periodo de duración: Los periodos de duración serán los que aparecen a continuación siempre que el producto sea utilizado para nebulizar 3 veces al día durante 10 minutos cada vez, a temperatura ambiente (23 °C). El periodo de duración podría variar dependiendo del entorno en el que sea utilizado.

Compresor (unidad principal): 5 años

Tubo de aire - Kit nebulizador - Boquilla - Mascarilla para niños - Mascarilla para adultos - Pieza nasal - Adaptador: 1 año; **Filtro de aire:** 70 aplicaciones


El uso frecuente de este producto podría acortar el periodo de duración.

Conozca su unidad

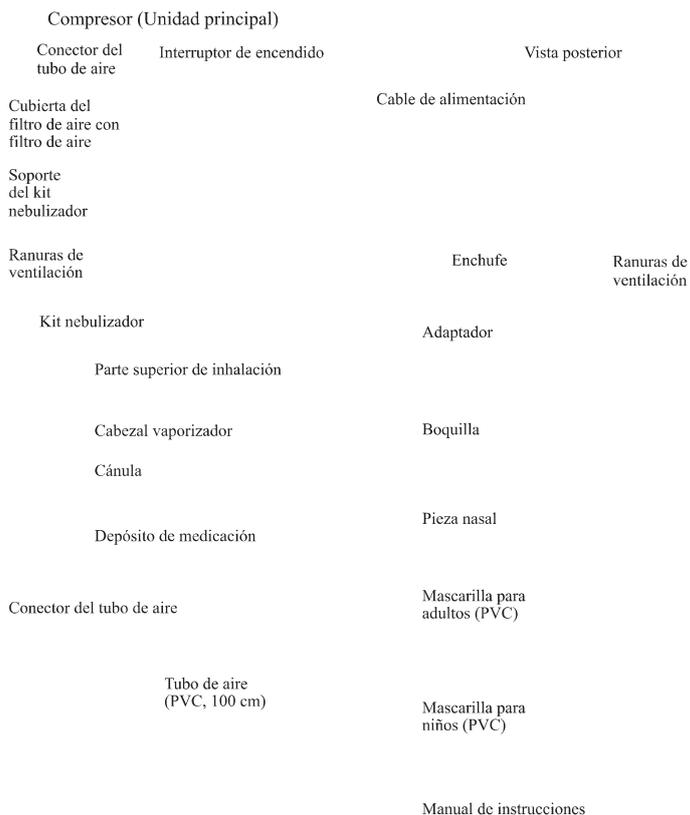

Funcionamiento del kit nebulizador

La medicación que se introduce a través del canal de medicación se mezcla con el aire comprimido que genera la bomba del compresor. La mezcla del aire comprimido y la medicación se transforma en pequeñas partículas y se pulveriza al entrar en contacto con el deflector.

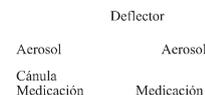

Aire comprimido

Instrucciones importantes sobre la seguridad

Lea detenidamente las instrucciones antes del uso.

Advertencia

1. Utilice el dispositivo solo como inhalador para propósitos terapéuticos. Cualquier otro uso es inapropiado y podría ser peligroso. El fabricante no se hace responsable de los usos inapropiados.
2. No utilice el dispositivo en circuitos anestésicos ni de respiración por ventilación.
3. Quite el enchufe siempre después de usar el dispositivo.
4. No cubra las ranuras de ventilación durante el uso. El compresor podría calentarse y existe un posible riesgo de quemarse si se toca.
5. El compresor y el enchufe no son resistentes al agua. No vierta agua ni otros líquidos en estas piezas. Si se vierte líquido en estas piezas, quite el enchufe inmediatamente y limpie el líquido.
6. No intente reparar el dispositivo. Consulte la sección Resolución de problemas.
7. Mantenga el dispositivo lejos del alcance de niños y bebés sin vigilancia adulta. El dispositivo puede contener piezas pequeñas que podrían tragarse.
8. Preste especial atención cuando este dispositivo se utilice con o junto a niños o inválidos.
9. Para obtener el tipo, la dosis y régimen de medicación, siga las indicaciones de su médico o neumólogo.
10. Este producto no deberá ser utilizado en pacientes en estado de inconsciencia o que no puedan respirar de forma espontánea.
11. Una vez terminado el tratamiento, no se olvide de desconectar el tubo de aire del nebulizador y del compresor.
12. Debido a su longitud, el enchufe y el tubo de aire podrían constituir un riesgo de estrangulación.
13. Asegúrese de usar el compresor en un lugar desde el que se pueda acceder fácilmente al enchufe durante el tratamiento.
14. Si sufre una reacción alérgica u otros problemas durante el uso del dispositivo, deje de usarlo de inmediato y consulte a su médico.
15. Cuando use el dispositivo, asegúrese de que no haya teléfonos móviles ni otros dispositivos eléctricos que emitan campos electromagnéticos a menos de 30 cm. Esto puede perjudicar el funcionamiento del dispositivo.

Instrucciones de uso

1. Asegúrese de que el interruptor de encendido está en la posición de apagado ().
2. Conecte el enchufe en una toma de corriente.
Nota: No instale el dispositivo en lugares donde no sea posible desconectar fácilmente el cable de alimentación.
3. Quite la parte superior de inhalación del depósito de medicación.
 - 1) Gire la parte superior de inhalación en el sentido contrario a las agujas del reloj.
 - 2) Eleve la parte superior de inhalación del depósito de medicación para sacarlo.
4. Agregue la cantidad correcta de medicación prescrita en el depósito de medicación.
5. Verifique que el cabezal vaporizador se encuentra en el interior del depósito de medicación.
6. Coloque de nuevo la parte superior de inhalación sobre el depósito de medicación.
 - 1) Baje la parte superior de inhalación sobre el depósito de medicación.
 - 2) Gire la parte superior de inhalación hacia la derecha.
7. Acople firmemente el adaptador y la mascarilla, la boquilla o la pieza nasal al kit nebulizador.
8. Coloque el tubo de aire. Mientras gira ligeramente el extremo del tubo de aire, introdúzcalo con firmeza en el conector del tubo de aire.
9. Sujete el kit nebulizador tal y como se indica a la derecha.
Siga las indicaciones de su médico o de su neumólogo.
Precaución:
No incline el kit nebulizador con un ángulo superior a 30 grados en cualquier dirección. La medicación podría fluir hacia el interior de la boca o la nebulización podría no realizarse de forma efectiva.
10. Mueva el interruptor a la posición de encendido (). Una vez que el compresor se encienda, la nebulización comienza y se genera el aerosol. Inhale suavemente la medicación. Suelte el aire a través del kit nebulizador.
11. Cuando haya finalizado el tratamiento, apague el compresor y desconecte el dispositivo de la toma de corriente.

